



Aktualisieren der 3 Shape DEDICAM Bibliothek für Inbox-Kunden (ab Version 2.8.8.9 - 13 bis Version 2014)

Öffnen Sie das 3 Shape Control Panel

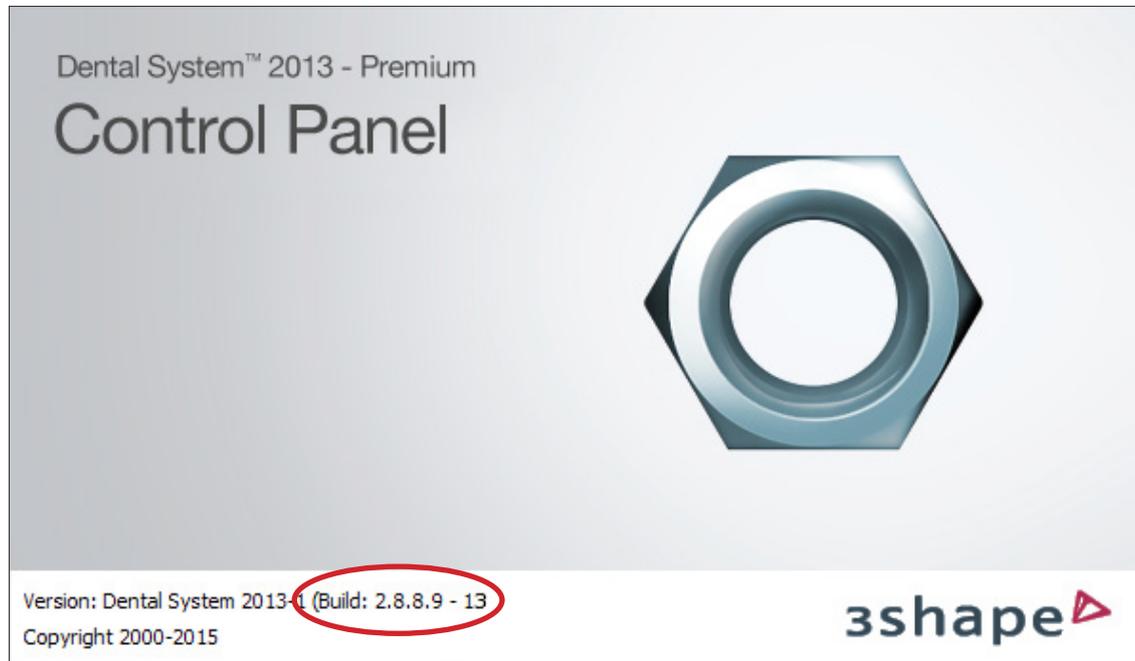

Klicken Sie unter **Standort Einstellungen** auf **Standort**

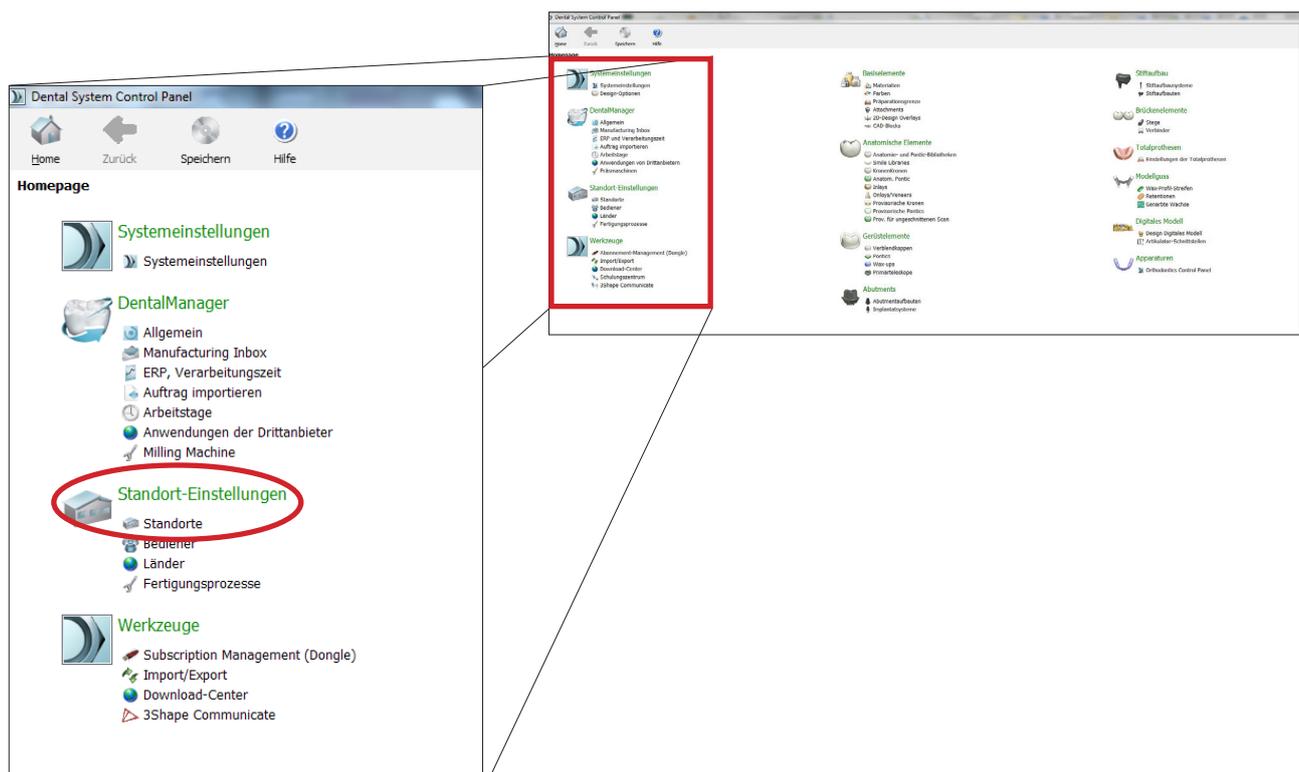

Wählen Sie in der linken Tabelle **DEDICAM-Inbox** aus
und klicken Sie anschließend rechts unten auf **Material herunterladen**

1.

2.

Es öffnet sich folgendes Feld.
Lassen Sie die Haken überall gesetzt und klicken Sie auf **Import**.

Materialien importieren und aktualisieren: 3Shape_DEDICAM_Bibliothek...

Wählen Sie die zu importierenden Materialien aus:

- Verfügbare Materialien**
- Anatom. Pontic
- Anatomie- und Pontic-Bibliotheken
- Anwendungen der Drittanbieter
- Attachments
- CAD blocks
- Farben
- Fertigungsprozesse
- Gerüst-Pontics
- Implantatsysteme
- Inlays
- Kronen
- Materialien
- Onlays/Veneers
- Provisorien
- Standorte
- Stege
- Verblendkappen
- Wax ups

Import Abbrechen

Materialien erfolgreich importiert

Wichtig: unbedingt **Aktualisierung** wählen.
Tipp: Grün eingekreistes Feld aktivieren - somit muss diese Frage nur einmal bestätigt werden.

camlog

Speichern vom Control Panel

Wichtig: unbedingt **Name beibehalten** wählen.
Tipp: Grün eingekreistes Feld aktivieren - somit muss diese Frage nur einmal bestätigt werden

camlog