



Brücke statt Prothese –
Zahnersatz mit Wohlfühlfaktor

a perfect fit

camlog



Liebe Leserin, lieber Leser,

ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität ist Ihr Aussehen, Ihr Lächeln und Ihr Wohlbefinden. Schöne weiße Zähne unterstreichen Ihre Attraktivität und Vitalität.

Zähne können aus vielen Gründen verloren gehen. Dieser Verlust beeinflusst nicht nur Ihr Aussehen, das Sprechen und die Nahrungsaufnahme, sondern kann zu Problemen im gesamten Organismus führen. Mithilfe von Implantaten können Zähne funktionell und ästhetisch ersetzt werden. Auch bei zahnlosen Kiefern werden Implantate zur Stabilisierung von Prothesen eingesetzt.

Camlog bietet eine Lösung für Patienten mit schlecht sitzenden Vollprothesen oder parodontal stark geschädigten Zähnen: Fest verschraubte Brücken auf Implantaten. So können Sie essen und sprechen wie mit Ihren eigenen Zähnen.

Weitere Vorteile der Versorgung sind, dass Sie mehr Platz für die Zunge haben und auch das Essen wieder in vollen Zügen genießen können, da auch im Oberkiefer der Gaumen frei bleibt.

Auf vier oder sechs Implantaten wird Ihnen die Rekonstruktion einer kompletten Zahnreihe fest eingesetzt – ein deutliches Plus an Lebensqualität.

Diese Broschüre bietet einen Überblick über die Funktionsweise von festsitzenden Versorgungen im unbezahnten Kiefer und ein Beispiel für den Ablauf der Behandlung. Lassen Sie sich von Ihrem Zahnarzt oder Ihrem implantologischen Spezialisten ausführlich über die Möglichkeiten in Ihrem individuellen Fall beraten.

Um auch nach der Implantation für Sie da sein zu können, haben wir das Camlog Gesundheitsprogramm **28PRO** für 28 gesunde Zähne und Implantate initiiert. Erfahren Sie ab Seite 12 in dieser Broschüre, wie Sie exklusiven Zugang zu vielen großartigen Vorteilen und Services auf **www.28pro.com** erhalten können, um bestens für ein langes Implantatleben gewappnet zu sein.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in dieser Broschüre teilweise auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung immer für alle Geschlechter. 28PRO® ist eine eingetragene Marke der CAMLOG Biotechnologies GmbH.

Inhalt

Festsitzender Zahnersatz – ein echtes Plus an Lebensqualität	6
Die fünf Schritte der Behandlung	8
Besonderheiten bei der Pflege	10
Das Camlog Gesundheitsprogramm 28PRO	12
Die Camlog Garantie patient28PRO	16
Die Vorteile der Versorgung auf einen Blick	17
Qualität „Made in Germany“	19



© zinkevych – stock.adobe.com



Festsitzender Zahnersatz – ein echtes Plus an Lebensqualität

Zähne erfüllen vielfältige Funktionen. Primär sind sie für die Nahrungszerkleinerung verantwortlich und tragen zur Sprachbildung bei. Zähne dienen aber auch dem Erhalt des Kieferknochens. Jeder Zahn besteht aus einer Zahnwurzel und einer Zahnkrone. Fehlt ein Zahn, kann ein Implantat im Wesentlichen die natürliche Zahnwurzel ersetzen. Ein Zahnimplantat ist vergleichbar mit einer kleinen Schraube, die in den Kieferknochen eingesetzt wird. Der Knochen wächst an das Implantat heran, so dass es fest im Kieferknochen verankert ist. Auf dem Implantat werden je nach Indikation Verbindungselemente, sogenannte Abutments, und der individuell gefertigte Zahnersatz befestigt.


Wenn Zähne einer ganzen Zahnreihe fehlen, fehlt der Kaudruck auf den Kiefer. In der Folge baut sich der Kieferknochen immer weiter ab. Die Prothese sitzt nicht mehr richtig und beeinträchtigt die Nahrungsaufnahme und die Sprachmotorik. Für diese Fälle gibt es ein wissenschaftlich fundiertes Behandlungskonzept zur Stabilisierung von Prothesen.

Da durch einen fortgeschrittenen Knochenabbau das Knochenangebot zur Fixierung der Implantate eingeschränkt ist und man beim Setzen von Implantaten anatomisch kritische Strukturen wie den Unterkieferverv oder die Kieferhöhle im Oberkiefer beachten muss, werden in der Regel die hinteren Implantate schräg gesetzt. Damit können, je nach patientenindividueller Situation, aufwändige und kostenintensive chirurgische Maßnahmen wie beispielsweise der Aufbau des Kieferknochens vermieden werden. Durch die schräg gesetzten Implantate kann im Vergleich zu gerade gesetzten eine bessere Kraftverteilung erzielt werden. Das bedeutet, dass die Kaukraft über eine größere Fläche abgestützt wird.

Je nach Ausgangssituation können Sie dank des Behandlungskonzepts mit Camlog in den meisten Fällen die Praxis noch am selben Tag mit fest verschraubten Zähnen in Form einer Brücke verlassen. Locker sitzende Prothesen gehören damit der Vergangenheit an. Sprechen, Lachen, Essen, die natürlichsten Dinge des Lebens, sind endlich wieder möglich – ein echtes Plus an Komfort und Sicherheit.




Für Patienten mit unbezahnem Kiefer sorgt eine festsitzende Versorgung für mehr Lebensqualität.

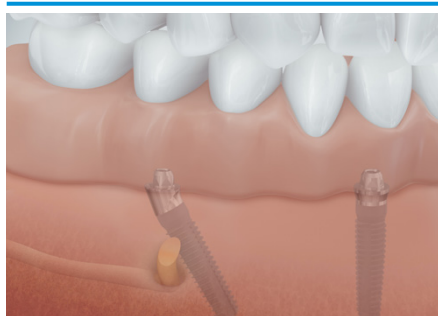

Anatomische Strukturen, wie der Unterkiefernerve, werden durch schräg eingesetzte Implantate geschont.



Bei reduziertem Knochenangebot im Oberkiefer kann mithilfe eines schräg gesetzten Implantats ein kostenintensiver Knochenaufbau vermieden werden.

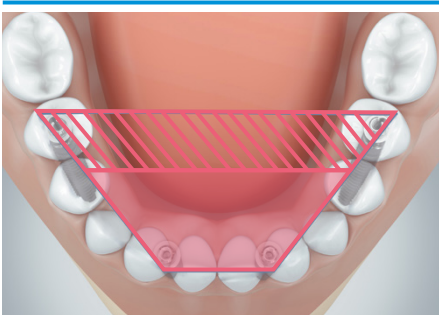

Durch zwei schräg gesetzte Implantate wird im Vergleich zu gerade gesetzten Implantaten eine größere Belastungsfläche erreicht.



Schon mit vier Implantaten im Unterkiefer kann ein Zahnersatz fest verschraubt eingesetzt werden. Schlecht sitzende Prothesen gehören damit der Vergangenheit an.



Die eingegliederten, fest verschraubten Brücken im Unterkiefer beispielhaft auf vier Implantaten, im Oberkiefer beispielhaft auf sechs Implantaten.

Die fünf Schritte der Behandlung

1

Diagnose

Nach einer ausführlichen Untersuchung Ihrer Mund- und Kiefersituation berät Sie Ihr Zahnarzt über das Behandlungskonzept für den festsitzenden Zahnersatz mit Camlog. Mit Ihrem Zahnarzt und dem Zahn-techniker besprechen Sie die Art der Rekonstruktion und äußern Ihre Wünsche an Ihren neuen Zahnersatz. Im Anschluss daran werden Sie über die einzelnen Behandlungsschritte unterrichtet.

2

Vorbehandlung

Das Behandlungskonzept sieht vor, dass zum OP-Termin der therapeutische Zahnersatz vorliegt. Für die Implantatplanung und zum Erstellen Ihres Zahnersatzes werden dreidimensionale Röntgenbilder (DVT/CT) und die Abformung Ihrer beiden Kiefer sowie eine Gesichtsbogenübertragung gemacht. Je nach Schwierigkeitsgrad kann für die Implantation im Labor eine Art Schablone gefertigt werden, die dem Zahnarzt hilft, Ihre Implantate unter Schonung anatomischer Strukturen präzise in Ihren Kiefer einzusetzen. Ob eine Schablone benötigt wird oder nicht, entscheidet Ihr Behandler entsprechend Ihrer individuellen Situation.

3

Am Tag der OP

Sie kommen in der Praxis an und werden für die OP vorbereitet. Was Sie am Tag der Operation beachten sollten, hat Ihnen Ihr Zahnarzt im Vorbereitungs-gespräch erläutert. Durch moderne Anästhesie- und Implantationsmethoden wird der Eingriff möglichst schonend vorgenommen. Die Dauer ist unterschiedlich und hängt von Ihrer individuellen Situation ab. Die Implantate werden positionsgenau und ohne weitere chirurgische Maßnahmen zum Knochenaufbau eingesetzt.

Nachdem die Implantate gesetzt sind, kann die im Labor für den OP-Tag vorbereitete therapeutische Versorgung eingesetzt werden. Dies ist nicht nur zeit- und kostensparend, sondern Ihre Implantate heilen schonend ein, ohne dass eine herausnehmbare Prothese die Heilung beeinträchtigt. Sie verlassen die Praxis in der Regel mit einem fest verschraubten therapeutischen Zahnersatz, mit dem Sie sich absolut sicher fühlen.



© hedgehog94 – stock.adobe.com

4

Heilungsphase

Ihre Implantate und die neuen Zähne erfordern regelmäßige Kontrolltermine, um sowohl die Funktion als auch die Passung zu überprüfen. In den ersten Wochen der Heilungsphase werden die Implantate schonend belastet. Das Zahnfleisch verändert sich in diesem Zeitraum. Ihre therapeutische Brücke wird bei Bedarf an die aktuelle Zahnfleischsituation angepasst.

5

Die definitive Versorgung

Abhängig vom Fortschritt der Heilung werden nach einigen Monaten für die Erstellung Ihrer definitiven Versorgung Abformungen der Kiefer und der Implantate genommen. Ihre neue Brücke wird dann im Labor hergestellt. Bei einem Einprobetermin wird nicht nur die perfekte Passung, sondern auch die Ästhetik und Funktion der Brücke geprüft. Die Zähne erhalten den letzten „Schliff“ und werden auf den Implantaten fest verschraubt. Sie können wieder unbeschwert lachen, sprechen und essen. Eine komfortable Lösung für ein Plus an Lebensqualität.

Besonderheiten bei der Pflege

Wie natürliche Zähne benötigen auch Implantatversorgungen gründliche Pflege. Da das Implantat fest im Kiefer verankert ist, konzentrieren sich die Pflegemaßnahmen auf die Übergangsbereiche vom Zahnfleisch zum Zahnersatz und den Zahnersatz selbst. Gute Reinigung und regelmäßige Kontrollen sichern den langfristigen Erfolg einer Implantatversorgung.

Wenn Zahnersatz auf Implantaten weder ausreichend gepflegt noch von Zahnbelägen befreit wird, können Zahnfleischentzündungen und Zahnfleischtaschen entstehen. Damit sind die Implantate weniger gut geschützt und können auf Dauer Schaden nehmen. Beugen Sie diesem Risiko durch regelmäßige Pflege vor!

Neben der täglichen Zahnpflege mit Zahnbürste und anderen Hilfsmitteln zur Reinigung der Brückenbasis ist die professionelle Zahnreinigung (PZR) in der Zahnarztpraxis die beste Investition in die Lebensdauer Ihrer Implantate.



Lassen Sie sich von Ihrer Zahnarztpraxis ausführlich über Pflege, Reinigungshilfsmittel und deren Anwendung beraten. Regelmäßige Kontrolltermine dienen der Sicherung des Langzeiterfolges Ihrer Implantate, sodass Sie lange Freude an Ihrer Implantatversorgung haben werden.

Damit Sie nicht lange nach einer passenden Pflege suchen müssen, haben wir hochwertige Implantat- und Zahnpflegeprodukte für Sie zusammengestellt. Finden Sie auf shop.28pro.com zudem auch ein attraktives Nach-OP-Pflegeset zum Vorteilspreis. Über einen Pflege-Finder können Sie sich bei diversen Krankheitsbildern sogar die passende Zahnpflege vorschlagen lassen. Da uns Ihre Gesundheit am Herzen liegt, haben wir aber nicht nur einen Shop mit Zahnpflegeprodukten, sondern auch ein umfassendes Gesundheitsprogramm mit vielen Services und Vorteilen für Sie ins Leben gerufen. Erfahren Sie mehr darüber auf Seite 12 in dieser Broschüre!



Das Camlog Gesundheitsprogramm 28PRO für 28 gesunde Zähne und Implantate

Ein Zahnimplantat ist immer eine bewusst getroffene Entscheidung und eine wertvolle Investition in die Gesundheit. Die meisten Patienten sind gut aufgeklärt und informieren sich im Vorfeld ihrer Behandlung ausführlich. Jedoch wissen laut einer Umfrage nur 27 Prozent der Implantatpatienten, welches Medizinprodukt in ihrem Körper ist. Um

für mehr Transparenz in der Implantologie zu sorgen, haben wir deshalb die Gesundheitsplattform 28PRO etabliert. Auf www.28pro.com finden Sie neben umfassenden Informationen rund um die Implantologie auch viele innovative Services und interessante Benefits für die Zeit nach der Implantation.



Sechs Gründe für unsere Gesundheitsplattform 28PRO



1 Digitaler Implantationsausweis

In einer Patientenstudie haben wir herausgefunden, dass mehr als die Hälfte der Patienten keinen Implantationsausweis hat – um genau zu sein, sogar sechs von zehn Implantatpatienten. Das muss im Laufe eines Implantatlebens nicht zwangsläufig zu einem Problem werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass es als Implantathersteller unsere Pflicht ist, Sorge dafür zu tragen, dass Sie weltweit und zu jeder Zeit die Behandlung nachweisen können. Nicht

nur, falls ein weiteres Implantat gesetzt oder der implantatgetragene Zahnersatz ausgetauscht werden muss, sondern auch im Falle eines Umzugs, Unfalls, Auslandsaufenthalts und aus vielen weiteren Gründen.

Nehmen Sie Ihren Implantationsausweis zu jeder Sitzung im Zuge Ihrer Implantatbehandlung mit und lassen Sie sich die gesamte Implantatversorgung gut dokumentieren.



2 Garantie patient28PRO

Wir haben mit patient28PRO eine Garantie ins Leben gerufen, die immer dann greift, wenn bei einer Implantation durchgängig Camlog Originalkomponenten verwendet wurden. Registrieren Sie Ihr Camlog Implantat sowie die verwendeten Komponenten auf www.28pro.com/registrierung oder über die 28PRO App – am besten gleich nach der OP. Auch wenn bereits in der Vergangenheit Zahnimplantate gesetzt wurden, können Sie diese gerne nachtragen.

So behalten Sie nicht nur den Überblick, sondern haben auch den besten Schutz – egal, wie das Leben spielt und wo sich Ihr Implantationsausweis auch gerade verstecken mag.

Mehr zu unserer einzigartigen Garantie finden Sie auf Seite 16 oder unter www.28pro.com/garantie.

Jetzt
Implantat-
registrierung
vormerken!



© bernardbodo - stock.adobe.com

3 OP-Nachsorge-Coach

Trotz optimaler Aufklärung tun sich in den Tagen nach der Operation häufig Fragen auf. Deshalb haben wir, gemeinsam mit erfahrenen Zahnärzten, valide Informationen zusammengestellt, die Patienten nach einer Zahnimplantation am meisten interessieren. Mit einem Klick stellen wir Ihnen einen digitalen Coach zur Seite: Erfahren Sie an den wichtigsten Tagen nach der Implantation, was in Ihrem

Körper passiert und worauf Sie in Sachen Mundhygiene, Medikamente, Essen und Sport bzw. körperlicher Belastung achten sollten.

Melden Sie sich kostenfrei zu Ihrem persönlichen „OP-Nachsorge-Coach“ auf www.28pro.com an und erhalten Sie einen ganzen Monat lang Tipps und Infos per Mail bzw. auf Ihr Smartphone.

4 Implantatbegleiter

Für ein langes Implantatleben ist es wichtig, trotz naturbedingter Veränderungen im Körper für optimale Bedingungen zu sorgen. Wir begleiten Sie mit interessanten Informationen – passend zu Ihrer Lebensphase bzw. Ihren Interessen und auch bei bestimmten Krankheitsbildern. Darüber hinaus haben wir in zahlreichen Gesprächen mit Zahnärzten gelernt, dass vielen Patienten weitere Fragen auf dem Herzen liegen. Deshalb hält unser „Implantatbegleiter“

für (fast) alle Fragen, passende Antworten für Sie parat. Wir hören auch weiterhin Patienten und Ärzten aufmerksam zu und bauen diesen Bereich stetig aus, so dass Sie hier immer wieder neue Informationen finden werden.

Melden Sie sich jederzeit zu diesem besonderen Service an! Wir stehen Ihnen gerne mit Expertentipps ein Implantatleben lang zur Seite.



5 Erinnerungsservice

Die zahnärztliche Kontrolle und die Zahnpflege sind in jeder Phase des Lebens wichtig. Nach implantologischen Behandlungen ist eine gründliche Mundhygiene jedoch das A und O, um möglichst lange Freude an der Implantatversorgung haben zu können. In einer repräsentativen Umfrage gaben 84 Prozent der Implantatpatienten an, dass sie sich einen Terminplaner wünschen, um an die zahnärztliche Kontrolle und die Professionelle Zahnreinigung erinnert zu werden. Sollte Ihre Zahnarztpraxis diesen Service nicht anbieten, sind Sie mit unserem Erinnerungsservice immer auf der sicheren Seite. Unser Timer ist auf einen leitlinienkonformen Rhythmus eingestellt und kann individuell angepasst werden. Die zahn-

ärztlichen Leitlinien zur Zahnpflege beruhen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und wurden entwickelt, um zur Behandlungssicherheit beizutragen. Empfiehlt Ihre Zahnärztin bzw. Ihr Zahnarzt einen engmaschigeren Abstand, können Sie dies in unserem System bequem an Ihre persönliche Situation anpassen.

Unterstützen Sie den Erfolg Ihrer Behandlung und stellen Sie Ihren persönlichen Timer für die zahnärztliche Kontrolle und Zahnreinigung. So können Sie Ihre Zahnarzt-Termine künftig nie mehr vergessen!



6 Shop für Implantat- und Zahnpflege

Damit Sie Ihre Implantatversorgung optimal schützen und pflegen können, haben wir für Sie recherchiert und ausgewählte Pflegeprodukte zusammengestellt. Finden Sie in unserem Shop für Implantat- und Zahnpflege alle wichtigen Produkte für eine optimale Mundhygiene nach der Zahnimplantation. Das Ziel ist den Heilungsprozess und die Gesunderhaltung von Zähnen, Zahnfleisch und Zahnimplantaten effektiv zu fördern und langfristig zu unterstützen.

Direkt nach der Implantation angewendet, wirkt sich der Einsatz von speziellen Implantat-Pflegeprodukten positiv auf den Heilungsprozess aus. Wer besonders gut vorsorgen möchte, kann die Implantat- und Zahnpflege auch als dauerhaften Begleiter nutzen.

Und weil uns Ihre Gesundheit am Herzen liegt, übernehmen wir bei der ersten Bestellung sogar Ihre Versandgebühren!

Die Camlog Garantie patient28PRO zum Schutz Ihrer Implantatversorgung

Auch wenn die gesamte Implantation, inklusive Pflege und Nachsorge optimal verlief und ausschließlich hochwertige Materialien eingesetzt wurden, kann ein Implantatverlust nie zu hundert Prozent ausgeschlossen werden. Die Gründe hierfür können vielfältig sein und lassen sich nicht immer klar benennen. Geht jedoch ein Implantat verloren, ist eine schnelle und unbürokratische Hilfe umso wichtiger. Für diese seltenen Fälle hat Camlog ein umfassendes Garantieprogramm entwickelt, das Ihr Behandlungsteam im Fall eines Implantatverlustes in Anspruch nehmen kann.

- Beim Einsatz von Camlog Originalteilen gilt eine lebenslange Garantie auf Implantat und Aufbau (Abutment)
- Darüber hinaus gewährt Camlog mit patient28PRO ab dem Tag der Implantation eine erweiterte Garantie für die ersten fünf Jahre

- Die Garantieverweiterung greift, wenn alle verwendeten Bestandteile aus dem Hause Camlog stammen. Sie umfasst auch Biomaterialien für die Knochenaugmentation sowie die prothetischen Komponenten, die für die Neuversorgung – den Zahnersatz auf den Implantaten – gebraucht werden.

Lassen Sie sich von Ihrem Praxisteam über die Camlog Garantie patient28PRO aufklären oder informieren Sie sich auf unserer Gesundheitsplattform 28PRO unter www.28pro.com

patient28PRO
Schützt Ihre Implantatversorgung

Die Vorteile der Versorgung auf einen Blick

Lebensqualität an einem Tag

Zahnlose Patienten haben in der Regel die Möglichkeit, eine sofort verfügbare, komfortable und festsitzende Versorgung mit Camlog am Tag der Operation zu erhalten. Ohne aufwändige chirurgische Knochenaufbau-Maßnahmen bietet das Behandlungskonzept ein deutliches Plus an Lebensqualität. Fest verankerte Zähne, mit denen Sie wieder optimal essen, trinken und sprechen können.

Schonend und kostengünstig

Die Behandlung ist besonders schonend, denn durch das abgewinkelte Setzen der Implantate im hinteren Kiefer können empfindliche Bereiche auch bei einem bereits stark zurückgegangenen Knochen umgangen werden. Durch dieses spezielle Behandlungsprotokoll werden die Implantate meist ohne aufwändige und kostenintensive Verfahren wie zusätzlicher Knochenaufbau gesetzt.

Hoher Tragekomfort

Viele Patienten haben mit der herkömmlichen Totalprothese eine für sie nicht zufriedenstellende Lösung. Das Essen und Sprechen fallen schwer, der schlechte Sitz der Prothese initiiert Druckstellen, wodurch sich der Knochen weiter zurückbildet. Auch die soziale Kompetenz leidet. Eine Gaumenplatte, die im Oberkiefer bei Vollprothesen notwendig ist, kann die Lautbildung erschweren und den Geschmackssinn beeinträchtigen. Die festverschraubte Brücke sorgt für einen hohen Tragekomfort, ein ästhetisches Aussehen und eine deutliche Steigerung des Wohlfühlens.



Alle Camlog Produkte werden von der ALTATEC GmbH, einem Unternehmen der Camlog Gruppe in Wirmheim, Baden-Württemberg, gefertigt.



Zahnimplantate von Camlog sind hochpräzise Medizinprodukte. Der Herstellungsprozess wird lückenlos überwacht.



Alle Produkte werden von qualifizierten Fachkräften gefertigt, geprüft und in einem Reinraum verpackt.

Mehr Informationen über Zahnimplantate und Camlog erhalten Sie auf unserer Gesundheitsplattform **28PRO**



www.28pro.com



Qualität „Made in Germany“

Medizinproduktehersteller tragen eine große Verantwortung. Camlog ist ein führender Hersteller von Zahnimplantaten und ein zuverlässiger Partner von Zahnärzten, Oralchirurgen, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen und Zahntechnikern.

Unser besonderes Augenmerk gilt der Verarbeitung körperverträglicher Materialien, dem Erzielen hervorragender Fertigungsqualitäten und dem Durchführen lückenloser Produktkontrollen zur Sicherheit der Patienten, der Zahnärzte, der Chirurgen, des zahnmedizinischen Fachpersonals und der Zahntechniker.

Das Medizinproduktegesetz stellt hohe Anforderungen an die Sicherheit und Funktionalität von Medizinprodukten. Camlog gibt darüber hinaus das Qualitätsversprechen, nur Produkte zu entwickeln und herzustellen, die dem neuesten Stand der Technik und der wissenschaftlichen Forschung sowie den betreffenden Normen der Medizintechnik entsprechen.

Zu erkennen ist ein solch konsequentes Qualitätsdenken an der erfolgreichen Zertifizierung unseres Qualitätsmanagementsystems nach ISO 13485. Die hohe Produktqualität wird zusätzlich durch die CE-Kennzeichnung nachgewiesen. Eine nachhaltige Produktion und Einhaltung der Umweltgesetze sind für uns ebenso selbstverständlich. Dies setzen wir mit einem zertifizierten Umweltmanagementsystem nach EMAS um.

Alle Camlog Produkte werden in Wimsheim, Baden-Württemberg, von qualifizierten Fachkräften „Made in Germany“ gefertigt. Die Implantate bestehen aus Reintitan. Dieses Material ist sehr stabil und besitzt eine hohe Körperverträglichkeit – die sogenannte Biokompatibilität.

Charakteristisch für alle Camlog Produkte sind deren unkomplizierte Anwendung, hohe Präzision und Zuverlässigkeit. Dies ist unser Beitrag zum Erzielen prognostizierbarer, funktionaler, ästhetischer und langfristig stabiler Behandlungsergebnisse.

Die besten Ansprechpartner bei allen Fragen zu Zahnimplantaten sind Ihr Zahnarzt und der implantologisch tätige Spezialist mit ihren Praxisteams.

Deutschland

CAMLOG Vertriebs GmbH
Maybachstr. 5
71299 Wimsheim

Österreich

ALLTEC Dental GmbH
Schwefel 93
6850 Dornbirn

Schweiz

CAMLOG Biotechnologies GmbH
Margarethenstr. 38
4053 Basel

